

دليل الحقن الذاتي تحت الجلد قلم شور كليك® الجاهز من أمجيفيتا® للاستعمال لمرة واحدة

باستخدام قلم شور كليك® يمكنك إجراء حقن أمجيفيتا® بنفسك في المنزل.

جهّز ما يلي:

- ✓ قلمًا جاهزًا جديدًا
- ✓ قطعة قطن مبلّلة بالكحول
- ✓ كرة قطن أو شاش
- ✓ شريطًا لاصقًا
- ✓ صندوق قمامة محكمًا غير منفذ

يُرجى الانتباه إلى ما يلي قبل الاستخدام:

- ✓ لا تتفّذ عملية الحقن إلا إذا بيّن لك طبيبك أو طاقم العيادة كيف تجري الحقن الذاتي.
- ✓ احتفظ بالأقلام الجاهزة في الثلاجة عند درجة حرارة 2 إلى 8 °م.
- ✓ لا تستخدم قلمًا جاهزًا، إذا سقط على سطح صلب. يمكن أن تتضرر أجزاء من القلم الجاهز، حتى وإن لم يمكنك اكتشاف أي ضرر.
- ✓ اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

مهم:

استخدم هذا الدواء دائمًا تمامًا حسبما تناقش معك طبيبك أو الصيدلي. اسأل طبيبك أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكدًا.

الخطوة 2: افحص قلم أمجيفيتا® الجاهز



انتبه إلى أن يكون الدواء في نافذة الرؤية نقيًا وعتيم اللون مانل إلى الصفرة. وراجع تاريخ انتهاء الصلاحية.

لا تستخدم القلم الجاهز، إذا:

- كان الدواء عكرًا أو متغير اللون، أو يحتوي ندفًا أو جزيئات.
- تناثرت أجزاء منه أو بدا أنه مكسور.
- سقط القلم الجاهز على سطح صلب.
- فُقد منه الغطاء الأصفر أو بدأ غير مترابك بصورة آمنة.
- تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق.

استخدم في جميع الحالات. قلمًا جاهزًا جديدًا

الخطوة 1: خذ قلم أمجيفيتا® جاهزًا من العبوة

استخرج القلم الجاهز قبل الحقن بحوالي 15 إلى 30 دقيقة بحذر واستقامة من الصندوق، بحيث يمكنه الوصول إلى درجة حرارة الغرفة. أعد التغليف الأصلي مع أقلام أمجيفيتا® غير المستخدمة إلى الثلاجة.

لا تفعل هذا أبدًا


- لا تعيد القلم الجاهز إلى الثلاجة، إذا كان قد وصل إلى درجة حرارة الغرفة بالفعل.
- لا تحاول تسخين القلم الجاهز باستخدام مصدر تسخين من قبيل الماء الساخن أو جهاز ميكروويف.
- لا تترج القلم الجاهز.
- لا تزل الغطاء الأصفر من القلم الجاهز مبكرًا.

الخطوة 3: حضّر موضع الحقن ونظفه

اختر موضع الحقن:

- البطن (ما استثناء نطاق قدره حوالي 5 سنتيمترات حول سرة البطن) أو
- الفخذ


عقم موضع الحقن باستخدام قطعة قطن مبلّلة بالكحول. ما إن يجف الجلد، تكون جاهزًا للحقن.

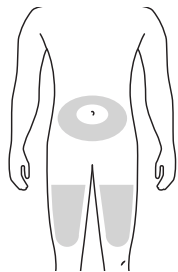


مهم:

- تجنّب ملامسة موضع الحقن مرة أخرى قبل الحقن.
- تأكد أنك لم تستخدم موضع الحقن نفسه تمامًا، الذي استخدمته في المرة الأخيرة.
- لا تختار مناطق يكون فيها الجلد حساسًا أو مجروحًا أو ملتهبًا أو متحجرًا – تجنّب الحقن في مناطق ذات ندوب أو علامات شد.
- إذا كنت مصابًا بمرض الصدفية، يتعين عليك تجنب الحقن المباشر في مواضع مؤرمة أو سميكة أو مصابة بالاحمرار أو مقشرة من الجلد أو في مواضع الجروح.

بعد الاستخدام

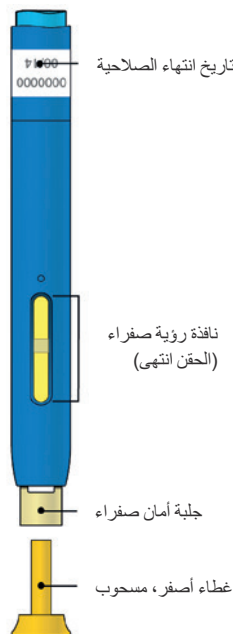


قبل الاستخدام

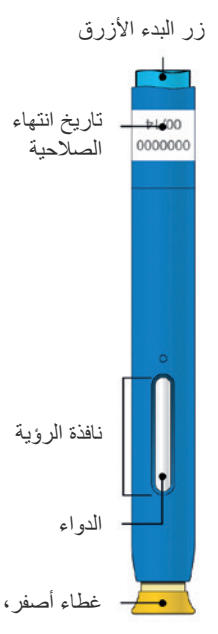

مهم: الإبرة مخبّأة في داخل القلم الجاهز!


الخطوة 8: واصل ضغط القلم الجاهز في مواجهة الجلد

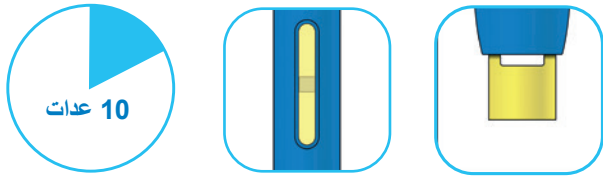

عد بشكل بطيء حتى عشرة. تتحوّل النافذة إلى اللون الأصفر، عندما ينتهي الحقن. ربما ستسمع صوت طقطقة ثانية. يمكنك انتزاع القلم الجاهز الآن من الجلد، وتُغطى الإبرة تلقائيًا أثناء ذلك.

مهم: عندما ترفع القلم الجاهز عن سطح الجلد ولا تتحوّل النافذة إلى اللون الأصفر أو عندما يبدو وكأن الدواء ما زال يُحقن، يعني ذلك أنك لم تتلقى جرعة كاملة. اتصل بطبيبك على الفور.

الخطوة 4: اخلع الغطاء الأصفر في خطٍ مستقيم

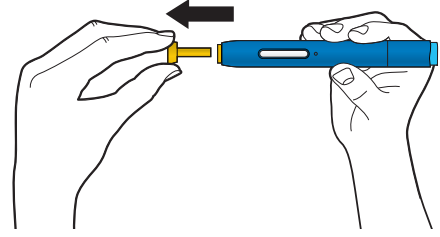


عندما تكون جاهزًا للحقن، اخلع غطاء حماية الإبرة الأصفر في خطٍ مستقيم بعيدًا عن الجسم. طبيعي أن ترى قطرة من الدواء على طرف الإبرة أو جلبة الأمان الصفراء.

لا تفعل هذا أبدًا

- لا تُدر الغطاء الأصفر أو تثنيه.
- لا تضع الغطاء الأصفر مجددًا على القلم الجاهز.
- لا تخلع الغطاء الأصفر من القلم الجاهز قبل أن تكون جاهزًا للحقن.

الخطوة 9: بعد الحقن

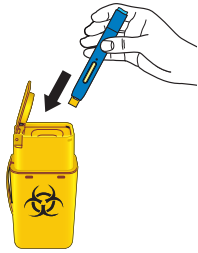


تخلّص من القلم الجاهز المستخدم فورًا عقب الاستخدام في صندوق قمامة محكم غير منفذ. ولا تتخلّص من القلم الجاهز المستخدم وصندوق القمامة المحكم في النفايات المنزلية ولا تُعد تدويرهما. وتحدّث مع طبيبك أو الصيدلي حول طريقة التخلص المثلى منهما.

مهم: لا تُعد استخدام القلم الجاهز المستخدم مرةً أخرى. وأبعد صندوق القمامة المحكم غير المنفذ عن متناول الأطفال.

الخطوة 5: هيئ سطحًا صلبًا للحقن

تتوفر لذلك طريقتان:

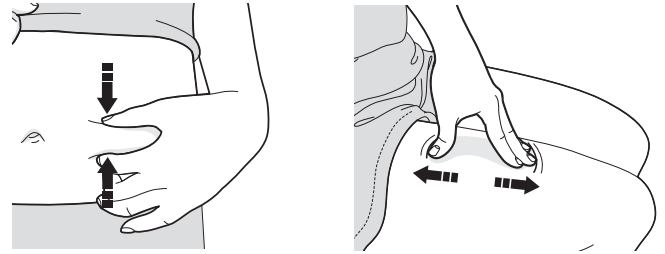

طريقة المد:

حرّك الإبهام والأصابع بقوة في اتجاهين متعاكسين، كي تنشئ مساحة عرضها 5 سنتيمترات تقريبًا.

طريقة الضغط:


اضغط المنطقة بين الإبهام والأصابع، بحيث تنشئ مساحة عرضها 5 سنتيمترات تقريبًا.

مهم: ابقِ الجلد ممددًا أو مضغوطًا أثناء الحقن.

الخطوة 10: افحص موضع الحقن

إذا انبثقت عن موضع الحقن قطرات دم، فاضغط عليه ليضع ثوانٍ باستخدام كرة قطن أو شاش. لا تحك موضع الحقن أبدًا. وإذا دعت الحاجة ضع شريطًا لاصقًا أو ضمادة صغيرة.


الخطوة 6: ضع القلم الجاهز

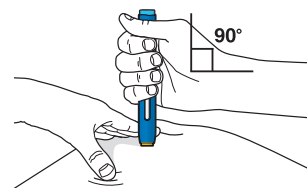

أبقِ الجلد ممددًا أو مضغوطًا أثناء الحقن. بعد نزع الغطاء الأصفر ضع القلم الجاهز على الجلد بزاوية 90 درجة.

مهم: لا تلمس زر البدء الأزرق بعد.

الخطوة 7: ثبت القلم الجاهز واضغط على زر البدء الأزرق

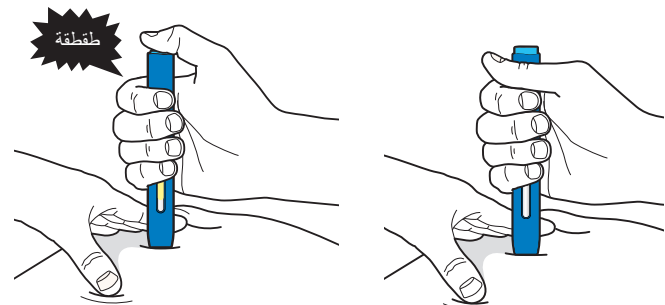

- اكبس القلم الجاهز بثبات على الجلد إلى أن يتوقف عن الحركة.
- عندما تكون جاهزًا للحقن، اضغط زر البدء الأزرق. ستسمع صوت طقطقة.
- يبدأ الحقن أوتوماتيكيًا.

AMGEN[®]
Care