

# Guide d'auto-injection sous-cutanée

## Stylo prérempli à usage unique AMGEVITA® SureClick®

**Le stylo prérempli SureClick® vous permet de procéder vous-même à l'injection d'AMGEVITA® chez vous.**

### Important:

Utilisez toujours ce médicament conformément aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Avant l'utilisation, veuillez tenir compte des informations suivantes:**

- ✓ Ne procédez vous-même à l'injection que si votre médecin ou le personnel soignant vous a déjà montré comment effectuer l'auto-injection.
- ✓ Conservez le stylo prérempli au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C.
- ✓ N'utilisez pas votre stylo prérempli s'il est tombé sur une surface dure. Des parties du stylo prérempli risqueraient alors d'être endommagées, même en l'absence de dommages visibles.
- ✓ Lavez-vous minutieusement les mains avec de l'eau et du savon.

**Préparez le matériel suivant:**

- ✓ Un stylo prérempli neuf
- ✓ Un tampon alcoolisé
- ✓ Un tampon d'ouate ou une compresse de gaze
- ✓ Un pansement
- ✓ Un collecteur d'aiguilles imperforable


### Étape 1: sortez un stylo prérempli AMGEVITA® de l'emballage

Retirez précautionneusement le stylo prérempli de la boîte en position droite environ 15 à 30 minutes avant l'injection, de manière à ce qu'il puisse atteindre la température ambiante. Remplacez l'emballage d'origine contenant les stylos AMGEVITA® non utilisés dans le réfrigérateur.

#### Ne jamais

- replacer le stylo prérempli dans le réfrigérateur s'il a déjà atteint la température ambiante;
- tenter de réchauffer le stylo prérempli à l'aide d'une source de chaleur, par ex. avec de l'eau chaude ou en le plaçant au micro-onde;
- secouer le stylo prérempli;
- retirer le capuchon jaune du stylo prérempli trop tôt.

### Étape 2: contrôlez le stylo prérempli AMGEVITA®

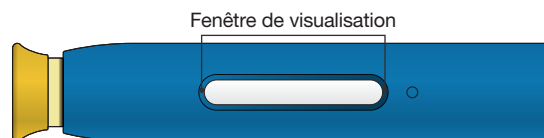


**En contrôlant à travers la fenêtre de visualisation, assurez-vous que le médicament est clair et incolore, voire légèrement jaunâtre. Vérifiez la date d'expiration.**

#### N'utilisez pas le stylo prérempli dans les cas suivants:


- si le médicament est trouble, si la couleur a viré ou en présence de paillettes ou de particules;
- si des parties du stylo semblent fissurées ou cassées;
- si le stylo prérempli est tombé sur une surface dure;
- si le capuchon jaune est manquant ou s'il n'est pas fixé de manière sûre;
- si la date d'expiration imprimée sur l'étiquette est dépassée.

**Utilisez dans tous les cas un stylo prérempli neuf.**

#### Avant l'utilisation

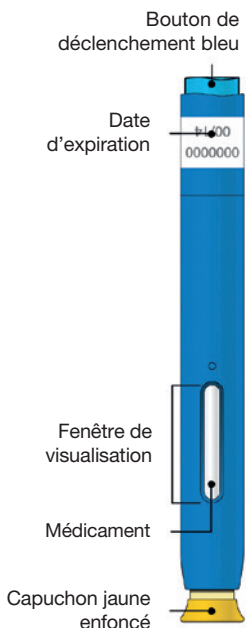


#### Après l'utilisation

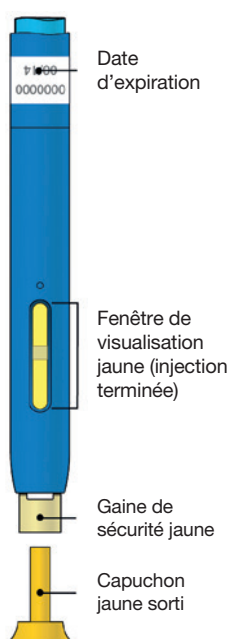

**Important :** l'aiguille est à l'intérieur

### Étape 3: préparez et nettoyez le site d'injection

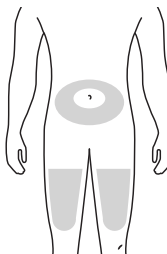

#### Choisissez votre site d'injection:


- au niveau du ventre (à l'exclusion du nombril, ainsi que la zone située tout autour de celui-ci, jusqu'à une distance d'environ 5 centimètres) ou
- au niveau du haut de la cuisse

Désinfectez le site d'injection à l'aide d'un tampon alcoolisé. La zone est prête pour l'injection dès que la peau est sèche.

#### Important:

- Évitez de retoucher au site d'injection avant l'injection.
- Assurez-vous de ne pas réutiliser le même site d'injection que lors de votre injection précédente.
- Ne choisissez pas une zone où votre peau est sensible, présente des lésions, est rougie ou durcie. Évitez de procéder à l'injection dans des zones présentant des cicatrices ou des vergetures.
- Si vous souffrez de psoriasis, évitez toute injection directement dans les zones de la peau présentant un relief, une surépaisseur, des rougeurs ou des squames, ainsi que dans les plaies.

#### Étape 4: retirez le capuchon jaune en le tenant bien droit


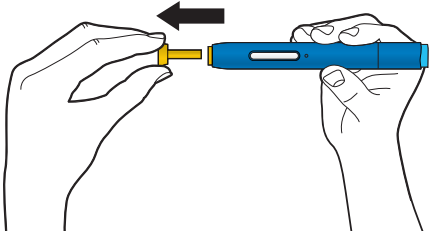


Lorsque vous êtes prêt(e) pour l'injection, retirez précautionneusement le capuchon jaune de protection de l'aiguille en tirant bien droit dessus, puis retirez-le du stylo. Une goutte de médicament peut être visible au niveau de la pointe de l'aiguille ou du capuchon de sécurité jaune. Ceci est normal.

##### Ne jamais

- tourner ou plier le capuchon jaune;
- replacer le capuchon jaune sur le stylo prérempli.
- retirer le capuchon jaune du stylo prérempli avant d'être prêt(e) pour l'injection.

#### Étape 8: continuez à appuyer le stylo prérempli contre la peau

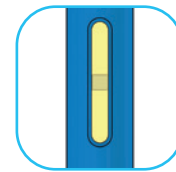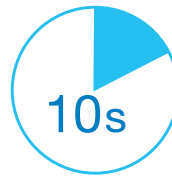


**Comptez lentement jusqu'à dix.** Une fois l'injection terminée, la fenêtre devient jaune. Il est possible que vous entendiez un deuxième clic. Vous pouvez alors retirer le stylo prérempli de votre peau. L'aiguille est alors automatiquement recouverte.

**Important:** si vous retirez le stylo prérempli de votre peau alors que la fenêtre n'est pas encore jaune ou s'il semble que du médicament soit encore injecté, vous n'avez alors pas reçu l'intégralité de la dose. Appelez immédiatement votre médecin.


#### Étape 5: préparez une surface ferme pour l'injection

Il existe deux méthodes pour cela :

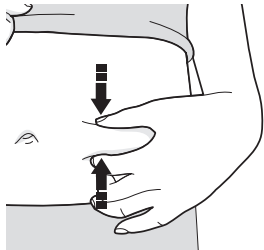

##### Méthode du pincement:

Pincez votre peau entre votre pouce et vos doigts de manière à préparer une zone d'une surface d'environ 5 centimètres.

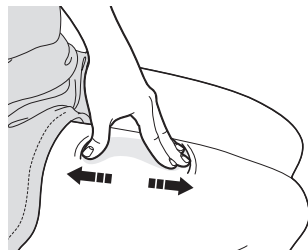

##### Méthode de l'étirement:

Écartez vigoureusement votre pouce et vos doigts dans des directions opposées de manière à préparer une zone d'une surface d'environ 5 centimètres.

**Important :** maintenez votre peau étirée ou pincée pendant l'injection

#### Étape 9: après l'injection




Éliminez le stylo prérempli usagé immédiatement après l'utilisation dans un collecteur d'aiguilles imperforable. N'éliminez pas le stylo prérempli usagé et le collecteur d'aiguilles avec les ordures ménagères. Ne les recyclez pas. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour connaître les réglementations en matière d'élimination.

**Important:** ne réutilisez pas le stylo prérempli lorsqu'il a déjà servi. Conservez toujours le collecteur d'aiguilles hors de portée des enfants.

#### Étape 10: contrôlez le site d'injection

Si du sang apparaît au niveau du site d'injection, appuyez sur la zone concernée pendant quelques secondes à l'aide d'un tampon d'ouate ou d'une compresse de gaze. Ne frottez **en aucun cas** le site d'injection. Si nécessaire, appliquez un pansement ou un petit bandage.


#### Étape 6: positionnez le stylo prérempli

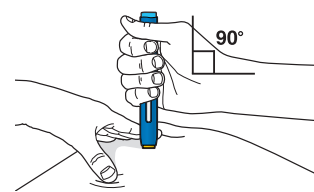

Maintenez votre peau étirée ou pincée pendant l'injection. Après avoir retiré le capuchon jaune, tenez le stylo prérempli contre votre peau à un angle de 90 degrés.

**Important :** n'appuyez pas encore sur le bouton de déclenchement bleu.

#### Étape 7: fixez le stylo prérempli et actionnez le bouton de déclenchement bleu

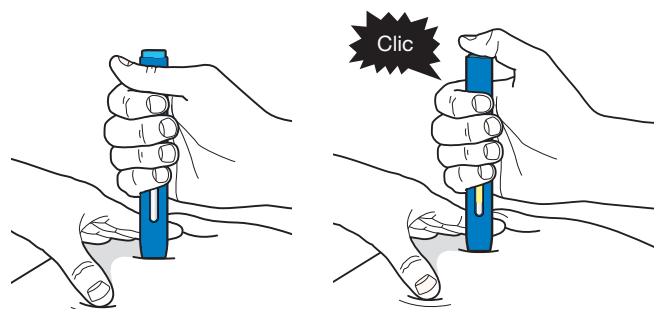

- Pressez fermement le stylo prérempli contre votre peau, jusqu'à ne plus pouvoir pousser.
- Lorsque vous êtes prêt(e) pour l'injection, appuyez sur le bouton de déclenchement bleu. Vous entendez alors un clic.
- L'injection démarre automatiquement.

**AMGEN**  
Care