

| IT |

Guida all'autoiniezione sottocutanea

AMGEVITA® SureClick® - penna preriempita monouso

La penna preriempita SureClick® permette di eseguire l'iniezione di AMGEVITA® autonomamente a casa.

Importante:

Per l'uso del medicinale attenersi sempre alle istruzioni ricevute dal proprio medico o farmacista. In caso di dubbio, chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Considerazioni importanti prima dell'utilizzo del medicinale:

- ✓ Effettuare l'autoiniezione solo se il proprio medico o il personale dell'ambulatorio le ha già mostrato come eseguirla.
- ✓ Conservare le penne preriempite in frigorifero a una temperatura da 2 a 8 °C.
- ✓ Non utilizzare la penna preriempita se è caduta su una superficie dura. L'impatto potrebbe aver danneggiato parti della penna, anche se in maniera non evidente.
- ✓ Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.

Prima di iniziare, preparare:

- ✓ Una penna preriempita nuova
- ✓ Tampone imbevuto di alcool
- ✓ Batuffolo di ovatta o garza
- ✓ Cerotto
- ✓ Contenitore non penetrabile


Fase 1: estrarre una penna preriempita AMGEVITA® dalla confezione

Circa 15-30 minuti prima dell'iniezione, estrarre la penna preriempita dalla confezione con cautela e tenendola dritta per permetterle di raggiungere la temperatura ambiente. Riporre in frigorifero la confezione originale con le penne AMGEVITA® non utilizzate.

È vietato

- Riporre la penna preriempita nel frigorifero una volta che ha già raggiunto la temperatura ambiente.
- Cercare di scaldare la penna preriempita utilizzando una fonte di calore, come ad es. acqua calda o il forno microonde.
- Agitare la penna preriempita.
- Rimuovere troppo presto il tappo giallo della penna preriempita.

Fase 2: controllare la penna preriempita AMGEVITA®

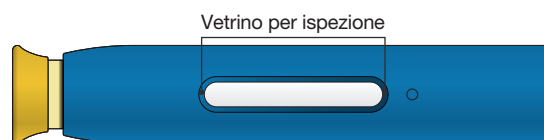

Assicurarsi che il medicinale visibile dal vetrino per ispezione sia trasparente o al massimo di colore leggermente giallognolo. Controllare la data di scadenza.


Non utilizzare la penna preriempita se:

- il medicinale appare torbido o colorato o contiene grumi o particelle.
- parti della penna appaiono staccate o rotte.
- è caduta su una superficie dura.
- il tappo giallo manca o non è inserito correttamente.
- è stata superata la data di scadenza indicata sull'etichetta.

Utilizzare in tutti i casi una penna preriempita nuova


Prima dell'uso

Dopo l'uso

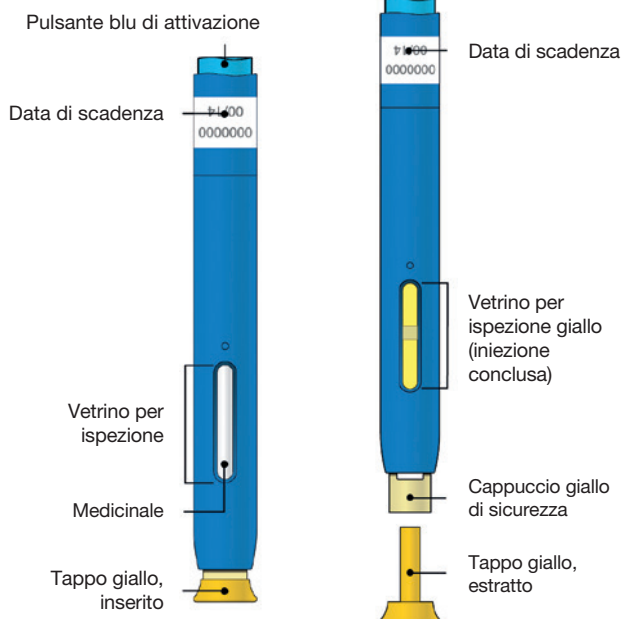

Importante: l'ago si trova all'interno.

Fase 3: preparazione e pulizia del sito dell'iniezione

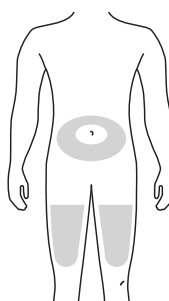

Scegliere se eseguire l'iniezione su:


- Addome (escludendo un'area di circa 5 centimetri attorno all'ombelico) oppure
- Coscia

Disinfettare il sito dell'iniezione con un tampone imbevuto di alcool. Quando la pelle è asciutta, è possibile eseguire l'iniezione.

Importante:

- Dopo aver pulito il sito dell'iniezione, evitare di toccarlo prima di eseguire l'iniezione.
- Assicurarsi di non eseguire l'iniezione sempre sullo stesso punto.
- Non eseguire l'iniezione su aree dove la pelle è sensibile, ferita, arrossata o ispessita; evitare zone con cicatrici o smagliature.
- Se si soffre di psoriasi, evitare di eseguire l'iniezione direttamente in lesioni o aree cutanee gonfie, ispessite, arrossate o desquamate.

Fase 4: estrarre il tappo giallo tirandolo via dritto



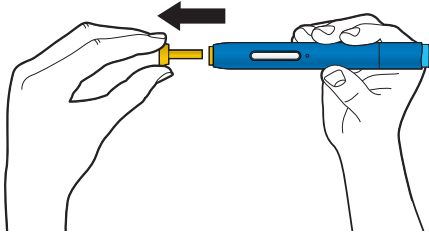


Quando si è pronti per l'iniezione, estrarre con cautela il tappo giallo che protegge l'ago senza piegarlo e tenendo la penna a distanza dal proprio corpo. È normale la presenza di una goccia di medicinale sulla punta dell'ago o sul cappuccio giallo di sicurezza.

È vietato

- Ruotare o piegare il tappo giallo.
- Inserire nuovamente il tappo giallo nella penna preriempita.
- Estrarre il tappo giallo dalla penna preriempita prima di essere pronti ad eseguire l'iniezione.

Fase 8: premere la penna preriempita contro la pelle

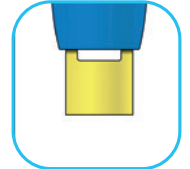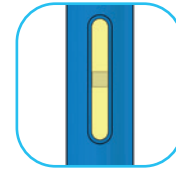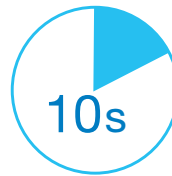


Contare lentamente fino a dieci. Il vetrino per ispezione si colora di giallo quando l'iniezione è conclusa. Eventualmente si sentirà un secondo clic. Ora è possibile staccare la penna dalla pelle e l'ago viene ricoperto automaticamente.

Importante: se, staccando la penna preriempita dalla pelle, si dovesse notare che il vetrino per ispezione non si è colorato di giallo o che l'iniezione del medicinale non è conclusa, significa che non è stata iniettata una dose completa. Chiamare immediatamente il proprio medico.


Fase 5: creare una superficie rigida sul punto dell'iniezione

Esistono due metodi:

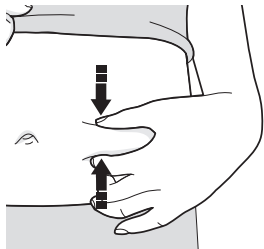

Premendo la pelle:

premere fermamente la pelle tra pollice e indice creando così una superficie di circa 5 centimetri di larghezza.

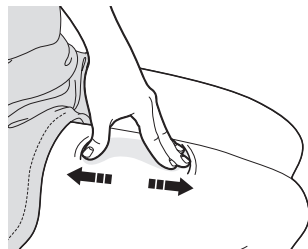

Tendendo la pelle:

tendere fermamente la pelle con pollice e indice per creare una superficie di circa 5 centimetri di larghezza.

Importante: continuare a tenere la pelle tesa o premuta durante l'iniezione.

Fase 9: dopo l'iniezione




Subito dopo l'uso, chiudere la penna preriempita usata in un contenitore non penetrabile. Non smaltire la penna usata e il contenitore non penetrabile nei rifiuti domestici né nei rifiuti riciclabili. Consultare il proprio medico o farmacista sulla modalità corretta di smaltimento.

Importante: non riutilizzare la penna preriempita usata. Conservare il contenitore non penetrabile sempre lontano dalla portata dei bambini.

Fase 10: controllo del sito di iniezione

In caso di perdita di sangue dal sito di iniezione, tamponare per alcuni secondi con un batuffolo di ovatta o una garza. Non strofinare **mai** il sito di iniezione. Se necessario, applicare un cerotto o una piccola benda.


Fase 6: posizionare la penna preriempita

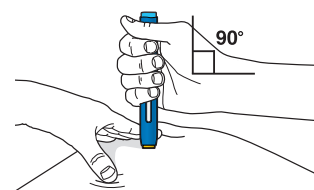

Tenere la pelle premuta oppure tesa durante l'iniezione. Dopo aver rimosso il tappo giallo, posizionare la penna preriempita sulla pelle formando un angolo di 90 gradi.

Importante: non toccare ancora il pulsante di attivazione blu.

Fase 7: fissare la penna preriempita e premere il pulsante blu di attivazione della siringa

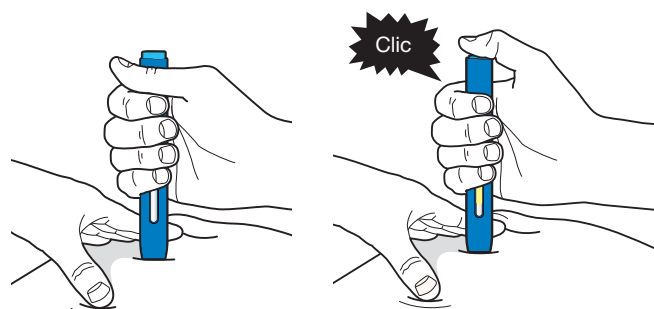

- Premere saldamente la penna preriempita sulla pelle fino a sentire che non può più muoversi.
- Quando si è pronti, premere il pulsante blu di attivazione della siringa. Si sentirà un clic.
- L'iniezione si avvia automaticamente.

AMGEN[®]
Care