

Instrukcja samodzielnego wstrzykiwania podskórnego

Wstrzykiwacz jednorazowego użytku AMGEVITA® SureClick®

Wstrzykiwacz SureClick® umożliwia samodzielne wstrzykiwanie leku AMGEVITA® w domu.

Ważne:

Lek należy stosować dokładnie według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem należy pamiętać o następujących kwestiach:

- ✓ Lek należy wstrzykiwać tylko wtedy, gdy lekarz lub personel kliniki zaprezentowali już, jak samodzielnie wstrzyknąć lek.
- ✓ Wstrzykiwacz należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2 do 8°C.
- ✓ Wstrzykiwacza nie należy używać, jeżeli upadł na twardą powierzchnię. Elementy wstrzykiwacza mogły ulec uszkodzeniu, nawet jeżeli uszkodzenia te są niewidoczne.
- ✓ Należy dokładnie umyć dłonie wodą i mydłem.

Konieczne jest przygotowanie następujących rzeczy:

- ✓ nowy wstrzykiwacz
- ✓ wacik nasączony alkoholem
- ✓ wata lub gaza opatrunkowa
- ✓ plaster
- ✓ pojemniczek zabezpieczony przed przekłuciem


Krok 1: Wyjmij wstrzykiwacz AMGEVITA® z opakowania

Wstrzykiwacz należy wyjąć ok. 15-30 minut przed wstrzyknięciem leku, aby osiągnął on temperaturę pokojową. Włóż oryginalne opakowanie z nieużywanymi wstrzykiwaczami AMGEVITA® z powrotem do lodówki.

Zabrania się

- wkładania wstrzykiwacza z powrotem do lodówki, po tym jak zdążył już osiągnąć temperaturę pokojową.
- podejmowania próby podgrzania wstrzykiwacza używając źródła ciepła np. gorącej wody lub mikrofalówki.
- potrząśnięcia wstrzykiwaczem.
- zbyt wczesnego zdejmowania żółtej osłonki ze wstrzykiwacza.

Krok 2: Sprawdź wstrzykiwacz AMGEVITA®

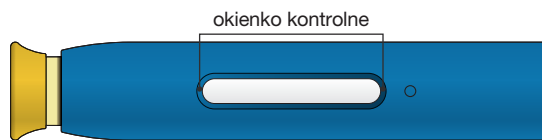


Zwróć uwagę, czy lek widoczny w okienku kontrolnym jest przezroczysty i bezbarwny do lekko żółtawego. Sprawdź datę ważności. Strzykawkę należy zawsze trzymać za cylinder strzykawki.

Wstrzykiwacza nie należy używać, gdy:

- lek jest mętny, zabarwiony, zawiera kłaczkę lub cząstki stałe.
- jeżeli jego poszczególne elementy wydają się uszkodzone lub połamane.
- upadł na twardą powierzchnię.
- brakuje żółtej osłonki lub nie jest ona trwale założona.
- nadrukowany na etykiecie termin ważności został przekroczony.

Zawsze należy używać nowego wstrzykiwacza.

Krok 3: Przygotuj i oczyść miejsce wkłucia

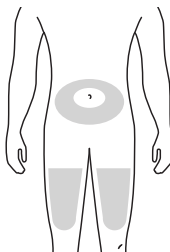

Wybierz miejsce wkłucia:


- brzuch (w wyjątkiem obszaru 5 centymetrów wokół pępka) lub
- udo

Miejsce wkłucia należy zdezynfekować wacikiem nasączonym alkoholem. Skóra jest gotowa do wstrzyknięcia leku po wyschnięciu.


Ważne:

- Przed wstrzyknięciem leku nie należy ponownie dotykać miejsca wkłucia.
- Należy upewnić się, że lek nie jest wstrzykiwany w dokładnie to samo miejsce wkłucia, które zostało wybrane poprzednim razem.
- Nie należy wybierać miejsc, w których skóra jest wrażliwa, zraniona, zaczerwieniona lub stwardniała – leku nie należy wstrzykiwać w miejscach, w których znajdują się blizny lub rozstępy.
- W przypadku chorowania na łuszczycę należy unikać wstrzykiwania leku bezpośrednio w wystające, zgrubiałe, zaczerwienione lub łuszczące się miejsca na skórze albo rany.

Przed użyciem

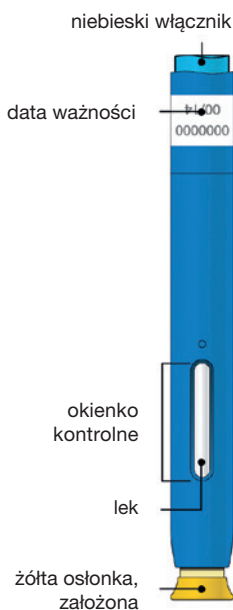


Po użyciu

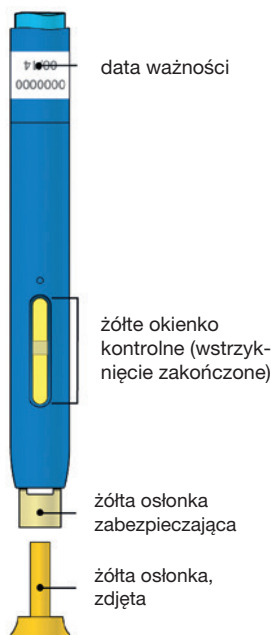

Ważne: Igła znajduje się we wstrzykiwaczu.

Krok 4: Prostym ruchem zdejmij żółtą osłonkę


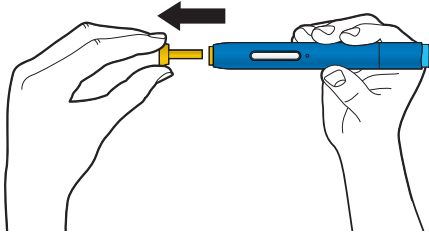


Jeżeli wszystko jest gotowe do wstrzyknięcia leku, to należy ostrożnie zdjąć osłonkę zabezpieczającą igłę w kierunku przeciwnym do ciała. Kropelka leku na końcu igły lub żółtej osłonki zabezpieczającej to zjawisko całkowicie normalne.

Zabrania się

- obracania lub wyginania żółtej osłonki.
- ponownego zakładania żółtej osłonki na wstrzykiwacz.
- zdejmowania żółtej osłonki ze wstrzykiwacza przed przygotowaniem do wstrzyknięcia leku.

Krok 8: Przyciśnij wstrzykiwacz mocniej do skóry

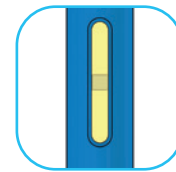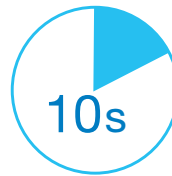


Powoli policz do dziesięciu. Okienko zmienia kolor na żółty po zakończeniu wstrzykiwania. Możliwe, że usłyszysz drugie kliknięcie. Można teraz zdjąć wstrzykiwacz ze skóry, igła zostanie przy tym usunięta automatycznie.

Ważne: Jeżeli wstrzykiwacz został zdjęty ze skóry, a okienko nie zmieniło koloru na żółty, lub wydaje się, że lek nie został wstrzyknięty, to oznacza to, że nie została wstrzyknięta pełna dawka leku. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Krok 5: Stwórz stabilną powierzchnię do wstrzyknięcia leku

Są na to dwa sposoby:

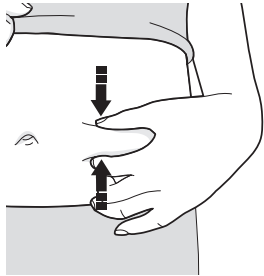

Metoda uciskowa:

Należy mocno ścisnąć skórę pomiędzy między kciukami i palcami, tak aby uzyskać powierzchnię o szerokości około 5 centymetrów.

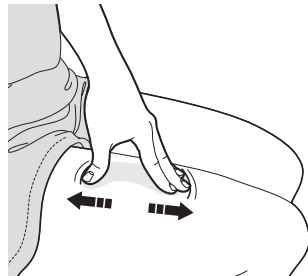

Metoda rozciągania:

Przesuwać mocno kciuki i palce przeciwnym kierunkiem, aby uzyskać powierzchnię o szerokości około 5 centymetrów.

Ważne: Podczas wstrzykiwania leku należy ścisnąć lub rozciągnąć skórę.

Krok 9: Po wstrzyknięciu




Wykorzystany wstrzykiwacz należy natychmiast po użyciu wrzucić do pojemniczka zabezpieczonego przed przekłuciem. Wykorzystanego wstrzykiwacza i pojemniczka zabezpieczonego przed przekłuciem nie należy wrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego, a także nie poddawać recyklingowi. Informacje o prawidłowej utylizacji produktu można uzyskać od lekarza lub farmaceuty.

Ważne: Wykorzystanych wstrzykiwaczy nie należy używać ponownie. Pojemniczek zabezpieczony przed przekłuciem należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Krok 10: Sprawdź miejsce wkłucia

W razie pojawienia się niewielkiej ilości krwi w miejscu wkłucia, należy je uciskać watą lub gazą opatrunkową przez kilka sekund. Miejsca wkłucia **nigdy** nie należy trzeć. W razie potrzeby można złożyć plaster lub mały opatrunek.


Krok 6: Wprowadzanie wstrzykiwacza

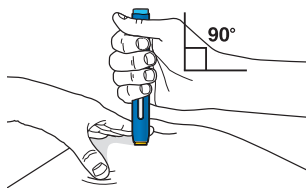

Podczas wstrzykiwania leku należy ścisnąć lub rozciągnąć skórę. Po usunięciu żółtej osłonki wstrzykiwacz należy ustawić pionowo, pod kątem 90 stopni, na skórze.

Ważne: Nie wolno jeszcze dotykać niebieskiego włącznika.

Krok 7: Ustabilizuj wstrzykiwacz i wciśnij niebieski włącznik.

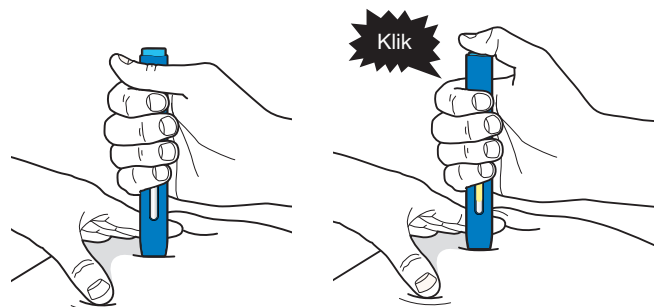

- Mocno dociśnij wstrzykiwacz do skóry, tak aby jego pozycja była stabilna.
- Jeżeli wszystko jest gotowe, wciśnij niebieski włącznik. Usłyszysz kliknięcie.
- Wstrzykiwanie rozpocznie się automatycznie.

AMGEN[®]
Care