

| RUS |

Инструкции по проведению подкожной самоинъекции Шприц-ручка одноразовая AMGEVITA® SureClick®

Инъекционная шприц-ручка SureClick® позволит Вам проводить инъекции препарата AMGEVITA® в домашних условиях.

Важно:

При использовании препарата строго следуйте рекомендациям Вашего врача или фармацевта. В случае любых сомнений обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Перед использованием ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- ✓ Проводите инъекцию лишь в том случае, если Ваш врач или медицинские сотрудники продемонстрировали Вам, как выполнять самоинъекцию.
- ✓ Храните готовую шприц-ручку в холодильнике при температуре 2-8 °С.
- ✓ Не используйте готовую шприц-ручку в случае ее падения на твердую поверхность. Части шприц-ручки могут быть повреждены, даже если визуально Вы не замечаете каких-либо повреждений.
- ✓ Тщательно вымойте руки водой с мылом.

Подготовьте следующие компоненты:

- ✓ новую шприц-ручку
- ✓ смоченный в спирте тампон
- ✓ ватный тампон или бинт
- ✓ пластырь
- ✓ прочный (непробиваемый) контейнер


Шаг 1: Извлеките готовую шприц-ручку AMGEVITA® из упаковки

Извлеките готовую шприц-ручку из упаковки примерно за 15-30 минут до инъекции, чтобы препарат нагрелся до комнатной температуры. Оригинальную упаковку с неиспользованными шприцами-ручками AMGEVITA® следует вернуть в холодильник.

Никогда

- не кладите готовую шприц-ручку в холодильник, если она достигла комнатной температуры.
- не пытайтесь нагреть готовую шприц-ручку с помощью источников тепла, таких как горячая вода или микроволновая печь.
- не встряхивайте шприц-ручку.
- раньше времени не снимайте желтый колпачок шприц-ручки.

Шаг 2: Проверьте готовую шприц-ручку AMGEVITA®

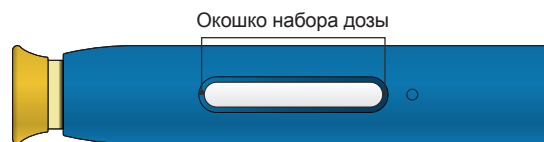


Убедитесь, что препарат в окошке набора дозы шприц-ручки прозрачен, а его оттенок варьируется от бесцветного до желтоватого. Проверьте его срок годности.

Никогда не используйте шприц-ручку, если:


- препарат выглядит мутным, изменил свой цвет либо имеет примеси в виде хлопьев или других частиц.
- имеются признаки нарушения ее целостности.
- имело место падение на твердую поверхность.
- желтый колпачок отсутствует или ненадежно закреплен.
- истек срок годности, указанный на этикетке.

Используйте в любом случае новую шприц-ручку.

Перед применением

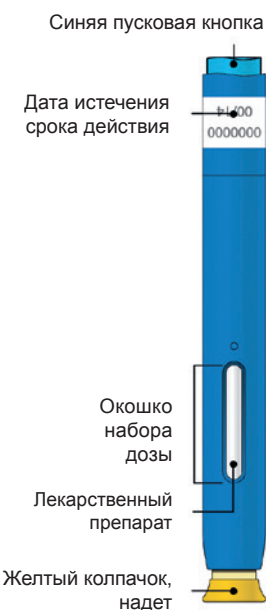


После применения

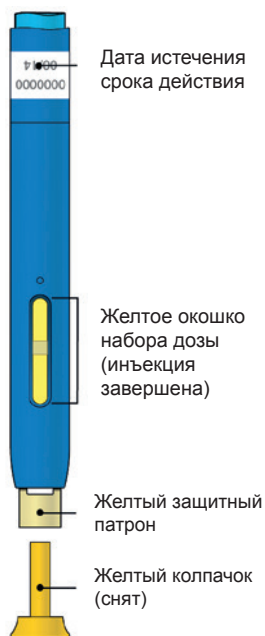

Важно: игла скрыта во внутренней части шприц-ручки.

Шаг 3: Подготовьте и продезинфицируйте место инъекции

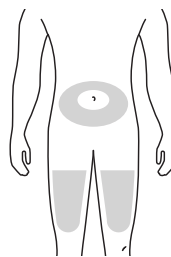

Выберите место инъекции:


- Живот (за исключением области вокруг пупка около 5 сантиметров) или
- Верхняя часть бедра

Продезинфицируйте область инъекции при помощи смоченного в спирте тампона. Как только кожа высохнет, можно делать инъекцию.

Важно:

- Избегайте прикосновения к месту инъекции непосредственно перед введением иглы.
- Убедитесь, что Вы выбрали новое место для инъекции, не совпадающее с тем, в котором она производилась в последний раз.
- Избегайте участков, в которых кожа особенно чувствительна, повреждена, имеет покраснения либо затвердения – не выполняйте инъекции в области рубцов или растяжек.
- Пациентам с псориазом (чешуйчатый лишай) следует избегать инъекций непосредственно в участки покрасневшей или шелушащейся кожи, или в очаги поражения на коже с выпуклыми псориатическими высыпаниями, уплотнением или повреждениями кожи.

Шаг 4: Снимите желтый колпачок, вытянув его прямым движением вдоль оси шприц-ручки.



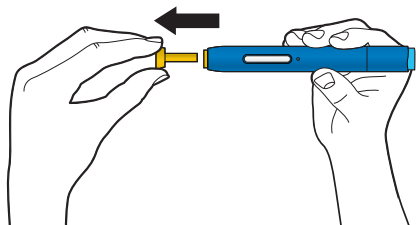


Когда Вы будете готовы к инъекции, аккуратно снимите желтый колпачок иглы, потянув за него прямо и от себя. На кончике иглы или желтого защитного патрона может выступить капля препарата, что считается нормальным явлением.

Никогда

- не поворачивайте и не сгибайте желтый колпачок иглы.
- не надевайте желтый колпачок на шприц-ручку повторно.
- не снимайте желтый защитный колпачок для иглы шприц-ручки, прежде чем будете готовы к инъекции.

Шаг 8: Нажмите на кнопку старта шприц-ручки, удерживая ее перпендикулярно коже

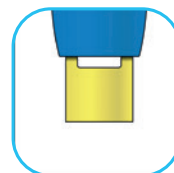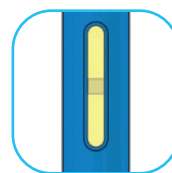
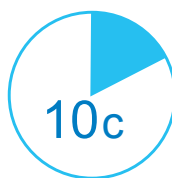


Медленно сосчитайте до десяти. Когда инъекция будет завершена, окошко станет желтым. Возможно, при этом Вы услышите второй щелчок. Теперь Вы можете извлечь шприц-ручку из кожи, при этом игла закроется автоматически.

Важно: Если Вы извлекли шприц-ручку, прежде чем окно стало желтым, или же Вы видите, что после извлечения препарат продолжает выделяться, это означает, что Вы не получили полную дозу препарата. В таком случае незамедлительно свяжитесь со своим врачом.

Шаг 5: Создайте твердую поверхность для инъекции

Сделать это можно двумя способами:

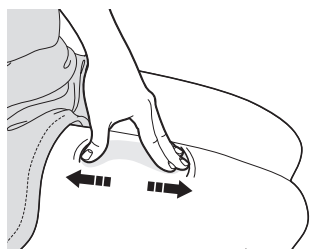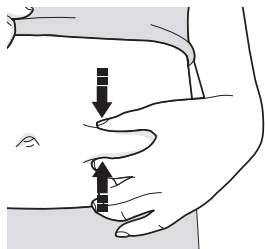

Создание кожной складки:

Сформируйте кожную складку между большим и указательным пальцами руки таким образом, чтобы образовался участок шириной около 5 сантиметров.

Растяжение участка кожи:

С силой разведите большой и указательный пальцы в разные стороны, чтобы образовался участок кожи шириной около 5 сантиметров.

Важно: непрерывно удерживайте кожу растянутой или собранной в складку при выполнении инъекции.

Шаг 9: После выполнения инъекции




Утилизируйте шприц-ручку сразу после использования, поместив ее в прочный контейнер. Использованные шприцы-ручки и контейнеры нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами или подвергать их переработке. Обратитесь к своему врачу или фармацевту за консультацией по надлежащей утилизации.

Важно: никогда не используйте готовую шприц-ручку повторно. Всегда храните прочный контейнер для шприцов в недоступном для детей месте.

Шаг 10: Проверьте место инъекции

В случае появления крови на месте инъекции прижмите к нему ватный тампон или бинт на несколько секунд. **Ни в коем случае** не растирайте место инъекции. При необходимости наложите пластырь или небольшую повязку.


Шаг 6: Разместите шприц-ручку

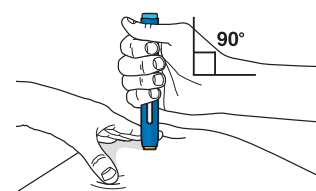

При выполнении инъекции удерживайте кожу растянутой либо собранной в складку. После снятия защитного колпачка установите шприц-ручку вертикально под углом 90 градусов к поверхности кожи.

Важно: не прикасайтесь пока к синей пусковой кнопке.

Шаг 7: Зафиксируйте шприц-ручку и нажмите на синюю пусковую кнопку.

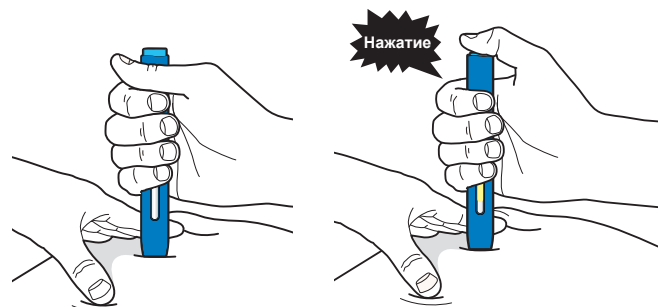

- Плотно удерживайте шприц-ручку перпендикулярно коже во избежание ее соскальзывания.
- Когда будете готовы к инъекции, нажмите на синюю пусковую кнопку. При этом должен раздаваться щелчок.
- Введение препарата начнется автоматически.

AMGEN[®]
Care