

Instrucciones para autoinyección subcutánea

Pluma precargada de un solo uso AMGEVITA® SureClick®

Con la pluma precargada SureClick® puede inyectarse en su casa su dosis de AMGEVITA®.

Importante:

Use siempre este medicamento exactamente como su médico o farmacéutico se lo indique. Consulte su médico o farmacéutico si no está seguro.

Antes del uso, tenga en cuenta lo siguiente:

- ✓ Realice la inyección solo si su médico o el personal de su consulta ya le han enseñado cómo realizar la autoinyección.
- ✓ Almacene la pluma precargada en el frigorífico entre 2 y 8 °C.
- ✓ No utilice la pluma precargada si ha caído sobre una superficie dura. Algunas partes de esta pueden estar dañadas, incluso si no puede detectar ningún defecto.
- ✓ Lávese las manos a fondo con agua y jabón.

Prepare lo siguiente:

- ✓ una nueva pluma precargada
- ✓ paño con alcohol
- ✓ algodón o gasa
- ✓ apósito
- ✓ recipiente a prueba de perforación


Paso 1: saque la pluma precargada AMGEVITA® del embalaje

Saque con cuidado la pluma precargada de la caja unos 15 a 30 minutos antes de la inyección para que pueda calentarse hasta la temperatura ambiente. Guarde el paquete original con las plumas AMGEVITA® no utilizadas de nuevo en la nevera.

Nunca

- vuelva a guardar la pluma precargada en la nevera si ha alcanzado ya la temperatura ambiente.
- intente calentar la pluma precargada con una fuente de calor, como por ejemplo agua caliente o un microondas.
- sacuda la pluma precargada.
- retire la tapa amarilla de la pluma precargada demasiado pronto.

Paso 2: compruebe el estado de la pluma precargada AMGEVITA®

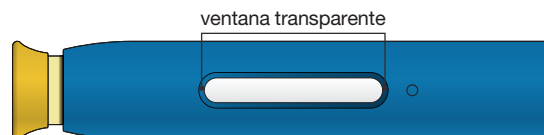


Asegúrese de que el medicamento en la ventana sea transparente e incoloro o ligeramente amarillento. Verifique la fecha de caducidad.

No utilice la pluma precargada en estos casos:


- el medicamento está turbio o descolorido o contiene flóculos o partículas.
- cuando algunas partes parecen agrietadas o rotas.
- la pluma precargada se ha caído sobre una superficie dura.
- la tapa amarilla no está presente o no está fijada correctamente.
- se ha sobrepasado la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Utilice en todos los casos una nueva pluma precargada.

Antes del uso

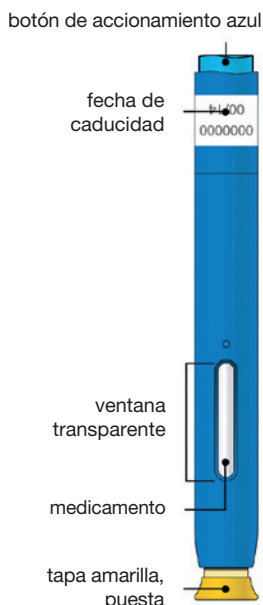


Después del uso

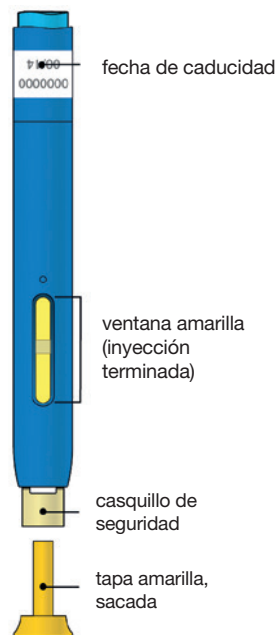

Importante: La aguja está en el interior.

Paso 3: prepare el lugar en el que se va a realizar la inyección

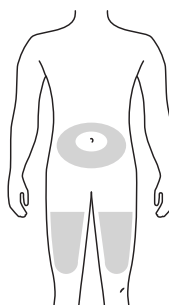

Seleccione su lugar de inyección:


- abdomen (excepto un área de unos 5 centímetros alrededor del ombligo) o
- muslo

Desinfecte el lugar de la inyección con un paño con alcohol. Una vez que la piel esté seca, estará lista para la inyección.

Importante:

- Intente no tocar el lugar de la inyección de nuevo antes de la inyección.
- Asegúrese de no elegir exactamente el mismo lugar de inyección que utilizó la última vez.
- No seleccione áreas donde la piel sea sensible, esté lesionada, enrojecida o endurecida - intente no inyectar en áreas con cicatrices o estrías.
- Si tiene psoriasis, debe intentar no inyectarse directamente en la piel o en heridas levantadas, engrosadas, enrojecidas o escamosas y en lesiones.

Paso 4: saque la tapa amarilla en horizontal


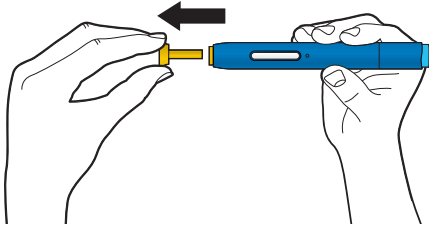


Cuando esté preparado para la inyección, tire suavemente de la tapa amarilla de la aguja de forma recta y hacia fuera del cuerpo. Es normal que haya una gota del medicamento en la punta de la aguja o en el casquillo de seguridad amarillo.

Nunca

- retuerza ni doble la tapa amarilla.
- vuelva a poner la tapa amarilla en la pluma precargada.
- saque la tapa amarilla de la pluma precargada antes de estar listo para la inyección.

Paso 8: presione la pluma precargada en la piel

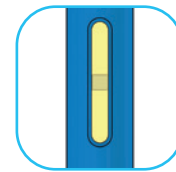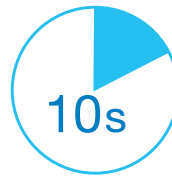


Cuente lentamente hasta diez. La ventana se vuelve amarilla cuando se completa la inyección. Es posible que escuche un segundo clic. Ahora puede retirar la pluma precargada de la piel, la aguja se cubre automáticamente.

Importante: si retira la pluma precargada de la piel y la ventana no se ha vuelto amarilla o si siente que el medicamento aún se está inyectando, significa que no ha recibido una dosis completa. Llame a su médico sin demora.


Paso 5: cree una superficie firme para la inyección

Para esto hay dos métodos:

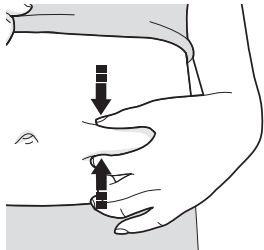

Método de presión:

Apriete firmemente la piel entre el pulgar y los dedos para crear un área de unos 5 centímetros de anchura.

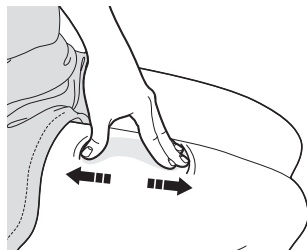

Método de estiramiento:

Mueva el pulgar y los dedos con fuerza en direcciones opuestas para crear un área de unos 5 centímetros de anchura.

Importante: Mantenga la piel estirada o presionada durante la inyección.

Paso 9: después de la inyección




Deseche la pluma precargada en un recipiente a prueba de perforación inmediatamente después de usarla. No tire la pluma precargada y el recipiente a prueba de perforación a la basura doméstica y no los recicle. Consulte con su médico o farmacéutico acerca de la eliminación adecuada.

Importante: no reutilice la pluma precargada usada. Mantenga siempre el recipiente a prueba de perforación fuera del alcance de los niños.

Paso 10: examine el lugar de inyección

Si sale un poco de sangre del lugar de la inyección, presione durante unos segundos con un bastoncillo de algodón o gasa. No frote **nunca** el lugar de la inyección. Si es necesario, aplique un apósito o un pequeño vendaje.

Paso 6: posicione la pluma precargada

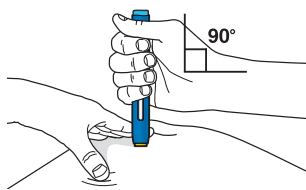


Mantenga la piel estirada o comprimida durante la inyección. Después de retirar la tapa amarilla, coloque la pluma sobre la piel en un ángulo de 90 grados.

Importante:

No toque aún el botón azul de accionamiento.

Paso 7: fije la pluma precargada y accione el botón de accionamiento azul

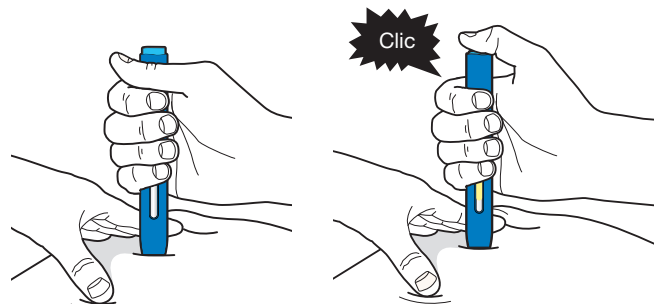

- Presione firmemente la pluma precargada contra la piel hasta que deje de moverse.
- Cuando esté listo para la inyección, pulse el botón de accionamiento azul. Escuchará un clic.
- La inyección se inicia automáticamente.

AMGEN[®]
Care