



AMGEVITA® SureClick®-Fertigpen zum Einmalgebrauch

Anleitung zur subkutanen Selbstinjektion

Mit dem SureClick®-Fertigpen können Sie die Injektion von AMGEVITA® zu Hause selbst vornehmen.

Wichtig:

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau so an, wie Ihre Ärztin, Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal es mit Ihnen besprochen hat. Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre:n Apotheker:in, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor der Anwendung beachten Sie bitte Folgendes:

- ✓ Führen Sie die Injektion nur aus, wenn Ihnen Ihr Arzt, Ihre Ärztin oder das Praxispersonal bereits gezeigt hat, wie Sie die Selbstinjektion vornehmen.
- ✓ Lagern Sie die Fertigpen im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
- ✓ Benutzen Sie einen Fertigpen nicht, wenn er auf eine harte Oberfläche gefallen ist. Teile des Fertigpens können beschädigt sein, selbst wenn Sie keine Beschädigung erkennen können.
- ✓ Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.

Legen Sie Folgendes bereit:

- ✓ Alkoholtupfer
- ✓ Pflaster
- ✓ Einen neuen Fertigpen
- ✓ Wattebausch oder Verbandmull
- ✓ Durchstichsicheren Behälter


Wichtige Injektionsschritte

Schritt 1: Nehmen Sie einen AMGEVITA®-Fertigpen aus der Verpackung.

Heben Sie den Fertigpen 30 Minuten vor der Injektion vorsichtig und gerade aus der Schachtel heraus, damit er Raumtemperatur erreichen kann. Legen Sie die Originalverpackung mit den nicht gebrauchten AMGEVITA®-Pens zurück in den Kühlschrank.

Niemals

- den Fertigpen zurück in den Kühlschrank legen, wenn er bereits Raumtemperatur erreicht hat.
- den Fertigpen mit heißem Wasser, in der Mikrowelle oder durch direktes Sonnenlicht erwärmen.
- den Fertigpen schütteln.
- die gelbe Kappe zu früh vom Fertigpen entfernen.

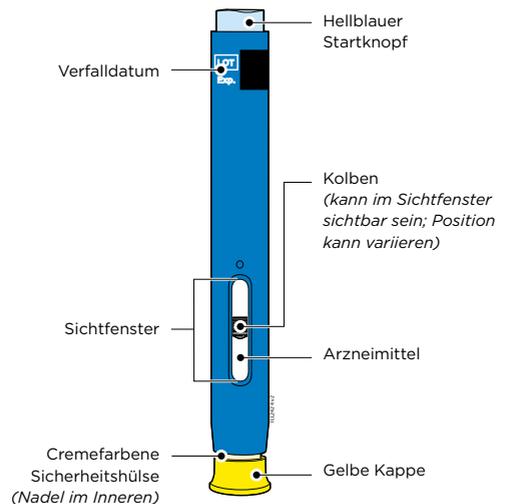


Schritt 2: Kontrollieren Sie den AMGEVITA®-Fertigpen.

Achten Sie darauf, dass das Arzneimittel im Sichtfenster klar und farblos bis leicht gelblich ist. Überprüfen Sie das Verfalldatum.

Wenden Sie den Fertigpen nicht an, wenn

- das Arzneimittel trübe oder verfärbt ist oder Flocken enthält.
- der Fertigpen Risse oder gebrochene Teile aufweist.
- der Fertigpen auf eine harte Oberfläche gefallen ist.
- die gelbe Kappe fehlt oder locker ist.
- das Verfalldatum, das auf dem Etikett aufgedruckt ist, überschritten ist.

Benutzen Sie in allen Fällen einen neuen Fertigpen.

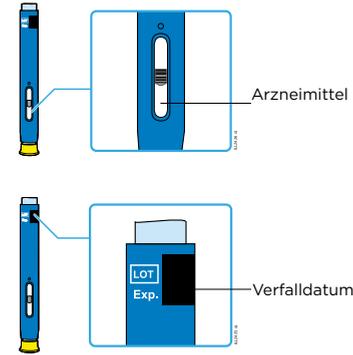

Schritt 3: Bereiten Sie die Injektionsstelle vor und reinigen Sie diese.


Wählen Sie Ihre Injektionsstelle aus:

- **Bauch** (mit Ausnahme eines Bereichs von etwa 5 Zentimetern um den Bauchnabel) ODER
- **Oberschenkel**

Desinfizieren Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Sobald die Haut trocken ist, sind Sie bereit für die Injektion.

Wichtig:

- Vermeiden Sie, die Injektionsstelle vor der Injektion noch einmal zu berühren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht genau an derselben Injektionsstelle ansetzen, die Sie beim letzten Mal verwendet haben.
- Wählen Sie keine Bereiche, in denen die Haut empfindlich, gerötet oder verhärtet ist bzw. einen Bluterguss aufweist.
- Vermeiden Sie, in Bereiche mit Narben oder Dehnungstreifen zu injizieren.
- Wenn Sie an Schuppenflechte (Psoriasis) leiden, vermeiden Sie eine direkte Injektion in geschwollene, dicke, gerötete oder schuppige Hautbereiche oder Läsionen.

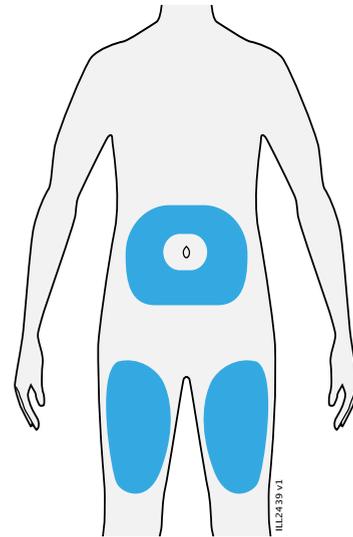


Schritt 4: Ziehen Sie die gelbe Kappe gerade ab.

Nehmen Sie die gelbe Kappe erst unmittelbar (max. 5 Minuten) vor der Injektion ab, weil das Arzneimittel austrocknen kann. Halten Sie den Fertigpen so, dass Sie das Sichtfenster sehen können. Ziehen Sie die gelbe Kappe gerade ab. Eventuell müssen Sie fest ziehen. Es ist normal, wenn Sie einen Tropfen Arzneimittel an der Nadelspitze oder der cremefarbenen Sicherheitshülse sehen.

Niemals

- die gelbe Kappe drehen, biegen oder daran wackeln.
- den Finger in die cremefarbene Sicherheitshülse stecken.

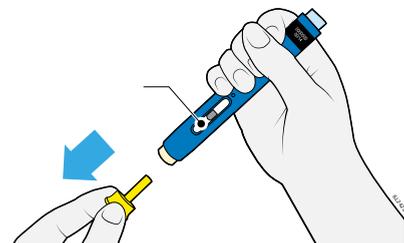


Schritt 5: Erzeugen Sie eine feste Oberfläche für die Injektion und platzieren Sie den Fertigpen.

Drücken Sie die Haut zusammen, um eine feste Fläche an der Injektionsstelle zu bilden.

Setzen Sie die cremefarbene Sicherheitshülse auf die Haut auf.

Halten Sie die Haut zusammengedrückt, bis die Injektion abgeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass das Sichtfenster zu sehen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Autoinjektor senkrecht (in einem Winkel von 90 Grad) auf die Injektionsstelle halten.

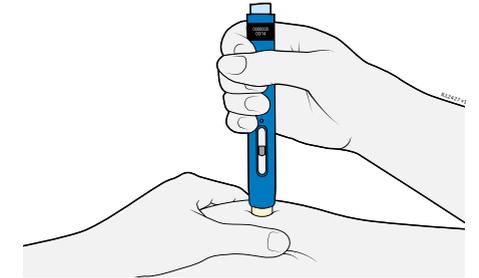


Schritt 6: Halten Sie den Fertigpen fest gegen die Haut.

Fest herunterdrücken, bis sich die cremefarbene Sicherheitshülse nicht weiterbewegt. Heruntergedrückt halten, nicht lösen.

Die cremefarbene Sicherheitshülse wird eingedrückt und entriegelt den hellblauen Startknopf.

- Halten Sie den Fertigpen weiter fest gegen die Haut und drücken Sie den hellblauen Startknopf, um die Injektion zu starten.
- Sie hören oder spüren möglicherweise einen Klick. Das Sichtfenster wird gelb und Sie können den hellblauen Startknopf nun loslassen.

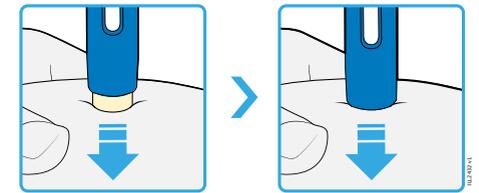

Schritt 7: Drücken Sie den Fertigpen weiter gegen die Haut.

Wenn das Sichtfenster vollständig gelb ist, ist die Injektion abgeschlossen. Es kann bis zu **10 Sekunden** dauern, bis die Injektion abgeschlossen ist.


Sie hören oder spüren möglicherweise einen Klick.

Heben Sie den Fertigpen von Ihrer Haut ab.

Die cremefarbene Sicherheitshülse umschließt die Nadel.

Wichtig:

Wenn Sie den Fertigpen von der Haut nehmen und das Fenster nicht gelb geworden ist oder wenn es so aussieht, als würde das Arzneimittel noch injiziert, bedeutet dies, dass Sie keine vollständige Dosis erhalten haben. Rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder die medizinische Fachkraft an.

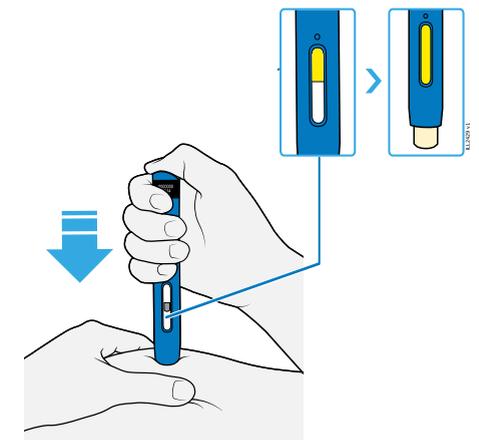

Schritt 8: Nach der Injektion

Entsorgen Sie den gebrauchten Fertigpen und die gelbe Kappe sofort nach dem Gebrauch in einem durchstichsicheren Behälter. Werfen Sie den gebrauchten Fertigpen und den durchstichsicheren Behälter nicht in den Haushaltsabfall und recyceln Sie diese nicht.


Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder Apotheker:in über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Wichtig:

Benutzen Sie den gebrauchten Fertigpen nicht wieder und

berühren Sie die cremefarbene Sicherheitshülse nicht.

Bewahren Sie den durchstichsicheren Behälter immer für Kinder unzugänglich auf.

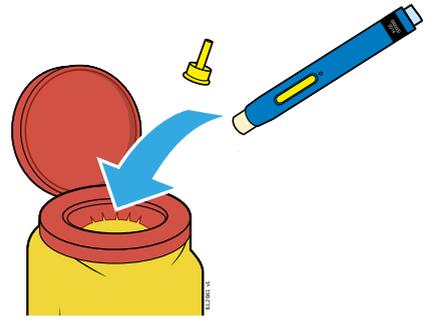

Schritt 9: Prüfen Sie die Injektionsstelle.

Sollte aus der Injektionsstelle etwas Blut austreten, drücken Sie einige Sekunden lang mit einem Wattebausch oder Verbandmull darauf. Reiben Sie **niemals** an der Injektionsstelle. Bringen Sie falls nötig ein Pflaster oder einen kleinen Verband an.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage.



Dieses Material
wurde auf recyceltem
Papier gedruckt.

AMGEN

Care