



AMGEVITA® SureClick® pluma precargada de un solo uso

Instrucciones para la autoinyección subcutánea

Con la pluma precargada SureClick® usted mismo puede inyectarse el medicamento AMGEVITA® en casa.

Importante:

Utilice este medicamento exactamente como se lo ha explicado su médico o el personal sanitario. Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

Antes del uso tenga en cuenta lo siguiente:

- ✓ Póngase la inyección solo cuando su médico o el personal de la consulta le haya enseñado cómo ponerse a sí mismo una inyección.
- ✓ Conserve la pluma precargada en la nevera a entre 2 y 8 °C. No la congele.
- ✓ No utilice una pluma precargada si se le ha caído sobre una superficie dura. Es posible que los componentes de la pluma precargada estén dañados, aunque usted no lo vea.
- ✓ Lávese bien las manos con agua y jabón.

Prepare lo siguiente:

- ✓ Una toallita empapada en alcohol
- ✓ Apósito
- ✓ Una pluma precargada nueva
- ✓ Torunda de algodón o gasa
- ✓ Contenedor resistente a los pinchazos


Pasos importantes para la inyección

Paso 1: Saque una pluma precargada AMGEVITA® de la caja.

30 minutos antes de la inyección saque la pluma precargada de la caja con cuidado y recta para que alcance la temperatura ambiente. Vuelva a meter en la nevera la caja original con las plumas AMGEVITA® no utilizadas.

Nunca

- ponga de nuevo la pluma precargada en la nevera si ya ha alcanzado la temperatura ambiente.
- caliente la pluma con agua caliente, en el microondas o mediante la luz directa del sol.
- agite la pluma.
- quite antes de tiempo el capuchón amarillo de la pluma precargada.

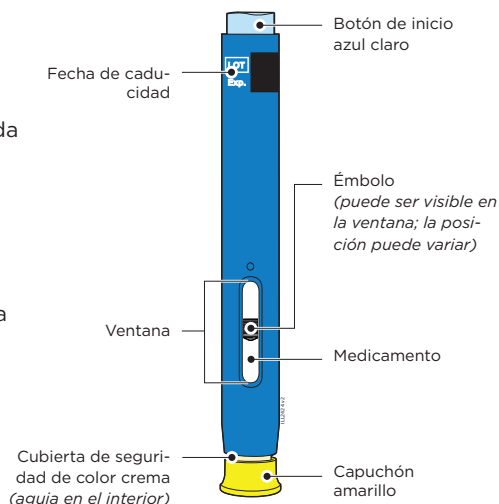


Paso 2: Inspeccione la pluma precargada AMGEVITA®.

Compruebe que el medicamento en la ventana de la pluma es transparente y de incoloro a ligeramente amarillento. Compruebe la fecha de caducidad.

No utilice la pluma precargada si

- el medicamento está turbio o presenta alteración del color, o si contiene copos.
- presenta grietas o partes rotas.
- se le ha caído sobre una superficie dura.
- falta el capuchón amarillo o está suelto.
- se ha superado la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

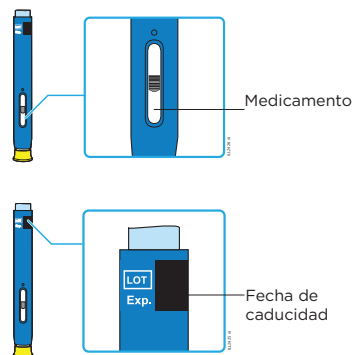

En todos estos casos utilice una pluma precargada nueva.

Paso 3: Prepare el lugar de la inyección y límpielo.


Elija el lugar para la inyección:

- el **abdomen** (excepto un área de aproximadamente 5 cm alrededor del ombligo) O
- el **muslo**

Desinfecte el lugar de la inyección con una toallita empapada con alcohol. Cuando la piel esté seca estará preparado para la inyección.

Importante:

- Evite tocar otra vez el lugar de la inyección antes de la inyección.
- Asegúrese de elegir para la inyección un lugar diferente al que utilizó la última vez.
- Evite las zonas con la piel sensible, enrojecida o endurecida, o que presente un hematoma.
- Evite ponerse la inyección en lugares con cicatrices o estrías.
- Si padece psoriasis evite inyectar directamente en zonas de la piel hinchadas, gruesas, enrojecidas, con escamas o con lesiones.

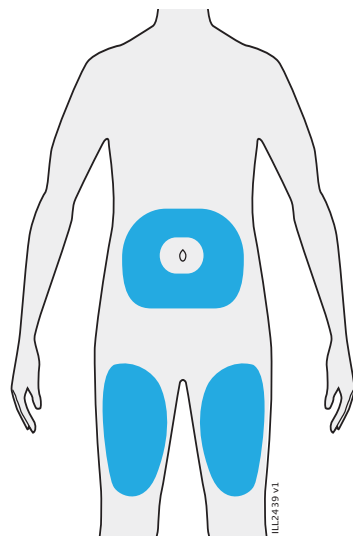


Paso 4: Tire del capuchón amarillo para quitarlo.

Quite el capuchón amarillo solo justo antes de la inyección (máx. 5 minutos), porque el medicamento se puede secar. Sujete la pluma precargada de modo que pueda ver la ventana de inspección. Tire del capuchón amarillo para quitarlo. Es posible que tenga que tirar con fuerza. Es normal que haya una gota del medicamento en la punta de la aguja o en la cubierta de seguridad de color crema.

Nunca

- gire, doble ni mueva el capuchón amarillo.
- introduzca el dedo en la cubierta de seguridad de color crema.

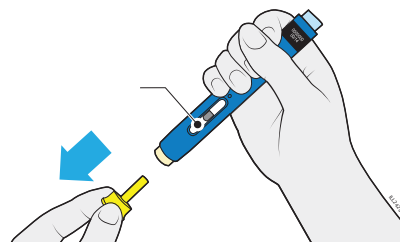


Paso 5: Cree una superficie firme para la inyección y coloque encima la pluma precargada.

Presione la piel para crear una superficie firme en el lugar de la inyección.

Coloque la cubierta de seguridad de color crema sobre la piel.

Mantenga la piel presionada hasta que haya terminado la inyección. Preste atención para que la ventana sea visible. Asegúrese de mantener el autoinyector en una posición vertical (en un ángulo de 90 grados) sobre el lugar de la inyección.

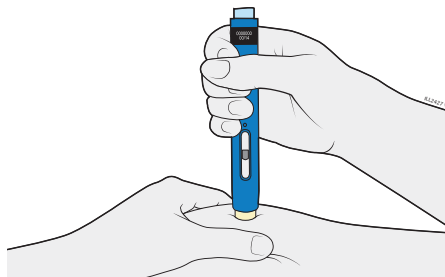

Paso 6: Mantenga la pluma precargada firmemente contra la piel.

Presione con firmeza hacia abajo hasta que la cubierta de seguridad de color crema no se mueva.



Mantenga apretado sin soltar.

La cubierta de seguridad de color crema se introduce en el interior y desbloquea el botón de inicio de color azul claro.

- Mantenga la pluma precargada firmemente contra la piel y presione el botón de inicio de color azul claro para comenzar con la inyección.

- Es posible que escuche o sienta un clic.

La ventana se vuelve amarilla; ahora puede soltar el botón de inicio de color azul claro.

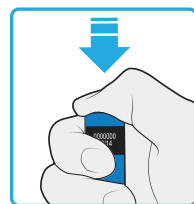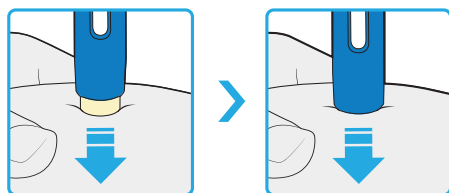

Paso 7: Siga apretando la pluma precargada firmemente contra la piel.

Cuando la ventana esté completamente amarilla la inyección ha finalizado. La inyección puede tardar hasta **10 segundos** en finalizar.

Es posible que escuche o sienta un clic.


Separe la pluma precargada de la piel.

La cubierta de seguridad de color crema rodea la aguja.

Importante:

Si al quitar la pluma precargada de la piel la ventana no está amarilla, o si parece que el medicamento aún se está inyectando, significa que usted no ha recibido la dosis completa.

Llame inmediatamente al médico o al personal sanitario.

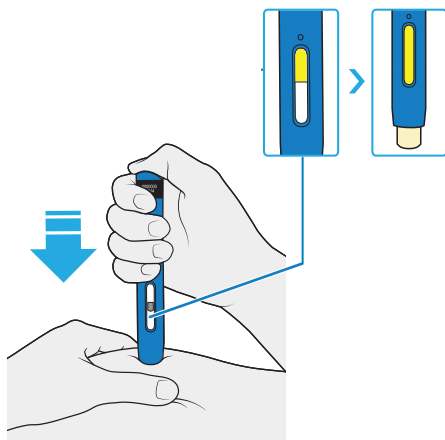

Paso 8: Después de la inyección

Deposite la pluma precargada usada y el capuchón amarillo en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después del uso.


No tire la pluma precargada usada ni el contenedor para objetos punzantes a la basura doméstica y no los recicle.

Pregunte a su médico o al farmacéutico por la eliminación adecuada.

Importante:

No reutilice la pluma precargada y no toque la cubierta de seguridad de color crema.

Guarde siempre el contenedor para objetos punzantes fuera del alcance de los niños.

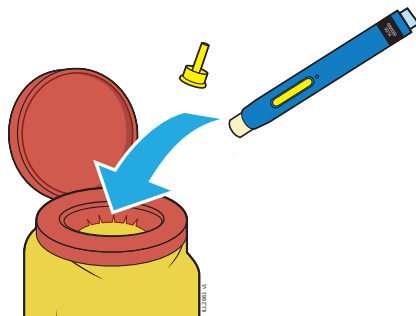

Paso 9: Compruebe el lugar de la inyección.

Si sale un poco de sangre del lugar de la inyección, presione durante unos segundos con una torunda de algodón o una gasa.

Nunca frote el lugar de la inyección. Si fuera necesario aplique un apósito o una pequeña venda.

En el prospecto encontrará información más detallada.