



AMGEVITA® SureClick®-Penna preriempiata monouso

Guida all'autoiniezione sottocutanea

La penna preriempiata SureClick® consente di effettuare da soli l'iniezione di AMGEVITA® a casa.

Importante:

Usare questo medicinale seguendo sempre le istruzioni ricevute dal medico o dal personale sanitario. In caso di dubbi, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Prima dell'uso, ricordare quanto segue:

- ✓ Effettuare l'autoiniezione solo se il medico o il personale dell'ambulatorio le ha già mostrato come fare.
- ✓ Conservare le penne preriempite in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C. Non congelare.
- ✓ Non utilizzare la penna preriempiata se è caduta su una superficie dura. L'impatto potrebbe aver danneggiato parti della penna preriempiata, anche se in maniera non evidente.
- ✓ Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Procurarsi quanto segue:

- ✓ Tampone imbevuto di alcool
- ✓ Cerotto
- ✓ Una nuova penna preriempiata
- ✓ Batuffolo di ovatta o garza
- ✓ Contenitore impermeabile


Passaggi importanti per l'iniezione

Passaggio 1: Prelevare una penna preriempiata AMGEVITA® dalla confezione.

Estrarre cautamente la penna preriempiata dalla scatola, tenendola dritta, 30 minuti prima dell'iniezione, per permetterle di raggiungere la temperatura ambiente. Riporre in frigorifero la confezione originale con le penne AMGEVITA® non utilizzate.

È vietato

- riporre la penna preriempiata in frigorifero una volta che ha raggiunto la temperatura ambiente.
- scaldare la penna preriempiata con acqua calda, nel microonde o esponendola alla luce solare diretta.
- agitare la penna preriempiata.
- rimuovere troppo presto il cappuccio giallo dalla penna preriempiata.

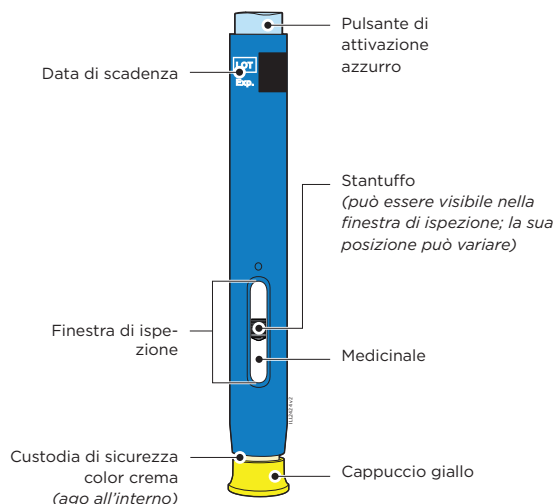


Passaggio 2: Controllare la penna preriempita AMGEVITA®.

Accertarsi che il medicinale visibile nella finestra di ispezione sia limpido e incolore o leggermente giallognolo. Controllare la data di scadenza.

Non utilizzare la penna preriempita se

- il medicinale appare torbido, di colore alterato o contiene fiocchi.
- la penna preriempita presenta spaccature o parti rotte.
- la penna preriempita è caduta su una superficie dura.
- il cappuccio giallo è assente o allentato.
- è stata superata la data di scadenza stampata sull'etichetta.

In tutti i casi, utilizzare una nuova penna preriempita.

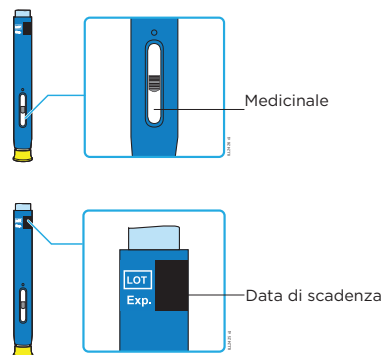

Passaggio 3: Preparazione e pulizia del sito di iniezione.


Scegliere il sito di iniezione:

- **Addome** (escludendo un'area di circa 5 centimetri intorno all'ombelico) oppure
- **Coscia**

Disinfettare il sito di iniezione con un tampone imbevuto di alcool. Quando la pelle è asciutta, si è pronti per l'iniezione.

Importante:

- Non toccare più il sito di iniezione prima dell'iniezione.
- Accertarsi di non effettuare l'iniezione esattamente nello stesso sito utilizzato la volta precedente.
- Non scegliere aree in cui la pelle è sensibile, arrossata o indurita, o dove sono presenti ematomi.
- Non effettuare l'iniezione in aree in cui sono presenti cicatrici o smagliature.
- Se si soffre di psoriasi, non effettuare l'iniezione direttamente nelle aree cutanee gonfie, ispessite, arrossate o desquamate o nelle lesioni.

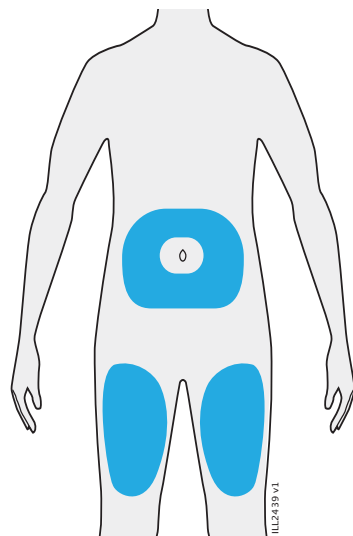


Passaggio 4: Togliere il cappuccio giallo tirandolo via dritto.

Togliere il cappuccio giallo solo poco (al massimo 5 minuti) prima dell'iniezione, perché il medicinale potrebbe seccare. Tenere la penna preriempita in modo da poter vedere la finestra di ispezione. Togliere il cappuccio giallo tirandolo via dritto. Può essere necessario tirare forte. La presenza di una goccia di medicinale sulla punta dell'ago o sulla custodia di sicurezza color crema è normale.

È vietato

- ruotare, piegare o fare oscillare il cappuccio giallo.
- infilare il dito nella custodia di sicurezza color crema.

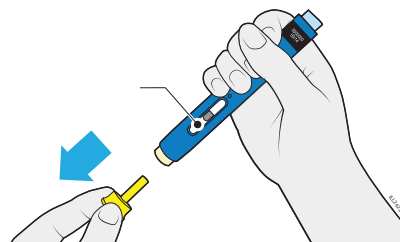


Passaggio 5: Creare una superficie compatta per l'iniezione e posizionare la penna preriempita.

Premere la pelle tra due dita per creare una superficie compatta nel sito di iniezione.

Posizionare la custodia di sicurezza color crema sulla pelle.

Continuare a tenere la pelle premuta fino alla fine dell'iniezione. Accertarsi di poter vedere la finestra di ispezione. Accertarsi di tenere l'autoiniettore in posizione verticale (formando un angolo di 90 gradi) sul sito di iniezione.

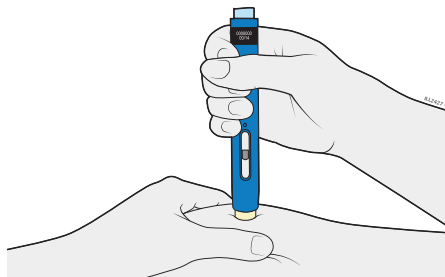

Passaggio 6: Premere saldamente la penna preriempita sulla pelle.

Premere saldamente finché la custodia di sicurezza color crema non si muove più.



Continuare a premere, non lasciare andare.

La custodia di sicurezza color crema viene premuta e sblocca il pulsante di attivazione azzurro.

- Continuare a premere saldamente la penna preriempita sulla pelle e premere sul pulsante di attivazione azzurro per avviare l'iniezione.

- Si potrà sentire o avvertire un clic.

La finestra di ispezione diventa gialla e ora si può lasciare andare il pulsante di attivazione azzurro.

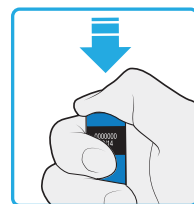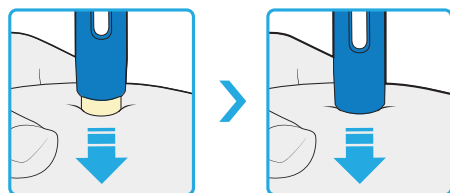

Passaggio 7: Continuare a premere la penna preriempita sulla pelle.

Quando la finestra di ispezione appare completamente gialla, l'iniezione è conclusa. Possono trascorrere fino a **10 secondi** fino alla conclusione dell'iniezione.

Si potrà sentire o avvertire un clic.


Sollevare la penna preriempita dalla pelle.

La custodia di sicurezza color crema copre l'ago.

Importante:

Se, sollevando la penna preriempita dalla pelle, si nota che la finestra non è diventata gialla o se sembra che l'iniezione del medicinale non sia conclusa, significa che non è stata iniettata la dose completa.

Chiamare immediatamente il proprio medico o operatore sanitario.

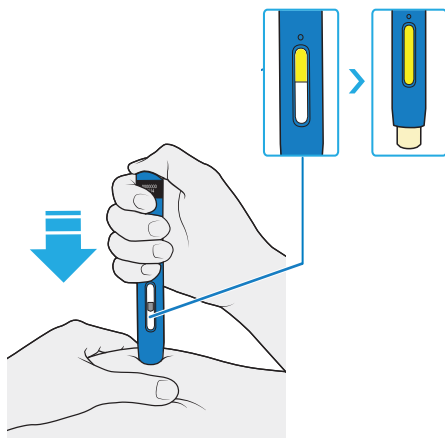


Passaggio 8: Dopo l'iniezione

Subito dopo l'uso, smaltire la penna preriempita usata e il cappuccio giallo in un contenitore impermeabile. Non gettare la penna preriempita usata e il contenitore impermeabile nei rifiuti domestici e non riciclarli. Consultare il medico o il farmacista sulle modalità corrette di smaltimento.

Importante:

Non riutilizzare la penna preriempita usata e non toccare la custodia di sicurezza color crema. Conservare il contenitore impermeabile sempre fuori dalla portata dei bambini.

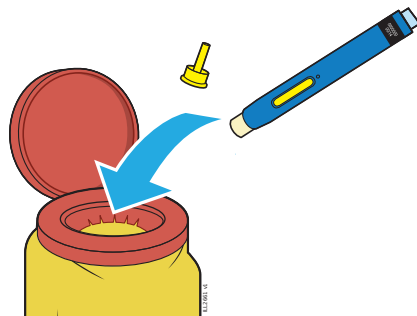

Passaggio 9: Controllo del sito di iniezione.

In caso di lieve perdita di sangue dal sito di iniezione, tamponare per alcuni secondi con un batuffolo di ovatta o una garza. Non strofinare **mai** il sito di iniezione. Se necessario, applicare un cerotto o un piccolo bendaggio.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda al foglio illustrativo.